

体験導入ワークショップ（機器貸出） ～介護テクノロジーマッチングに向けて～

介護テクノロジー紹介シート

企業名 : シーマン株式会社

企業 URL : <https://www.sheen-man.co.jp/> (ハイパーリンクを挿入しておいてください)

※ A4 2面（裏表）一枚に、1機種の情報が入るよう、以下をご記入ください。

1 製品／サービスの活用場面 下記の項目で、あてはまる主なものに○をつけてください（複数回答可）

- 居室 トイレ 個室 個室脱衣所 特殊浴槽 特殊浴槽脱衣所  
食堂 多目的ホール（共有リビングスペース） 看護・介護ステーション リハビリ室  
会議室 事務室 送迎車 その他（ ）

2 製品／サービスの分類 下記の項目で、あてはまる主なものに1つに○をつけてください

- 見守り支援 移乗支援 移動支援 入浴支援 排泄支援 食事支援  
リハビリ支援 介護記録等 介護業務支援 居室環境等管理支援 ヘルスケア  
その他（避難搬送支援）

3 製品／サービスの特徴

自力避難ができない等、ベッド上で臥位姿勢の人を  
避難させる必要がある状況

に対し、

素早くかつシンプルな避難活動を支援

することができる

4 製品／サービスで期待できる効果 下記の項目で、あてはまる主なものに○をつけてください（複数回答可）

- 介護者の身体的負担軽減 介護者の精神的負担軽減 介護スタッフ間の連携強化  
被介護者の安全確保 被介護者の QOL 向上 被介護者と介護スタッフとのコミュニケーション充実  
人材育成・定着促進 周辺業務の効率化・省力化 業務全体のマネージメント向上

5 製品／サービス名・写真

製品名／サービス名 : オプティマルエバックシート

製品／サービスの URL : [https://www.sheen-man.co.jp/product/product-cat05/evacuation\\_sheet/](https://www.sheen-man.co.jp/product/product-cat05/evacuation_sheet/)

製品／サービスの写真・動画 ※1機種の写真や動画 URL を載せてください



[https://www.sheen-man.co.jp/product/product-cat05/evacuation\\_sheet/](https://www.sheen-man.co.jp/product/product-cat05/evacuation_sheet/)

## 6 製品／サービスの概要（想定価格も含む）

素早くかつシンプルにベッド上で臥位の人を避難させることができます。

平時よりマットレスとベッドの間に敷いておき、緊急時は本製品のベルクロ付きストラップで掛布団ごと被介助者を固定し、短辺サイドに付いているハンドルを引っ張り、マットレスごと避難します。

想定価格：定価 ¥ 26,000（税抜き）

## 7 製品／サービスの主な対象者 下記の項目で、あてはまる主なものに○をつけてください（複数回答可）

- 介護者（施設ケア） ○介護者（在宅ケア） ○被介護者（施設ケア） ○被介護者（在宅ケア）  
リハビリ利用者（集団） リハビリ利用者（個別） 管理者（スタッフ管理） 管理者（利用者管理）

## 8 想定している被介護者の状況

- 想定できていない・検討中 → ⑨ にすすむ  
被介護者の状態無関係に利用可能 → ⑨ にすすむ  
被介護者の状態次第にて利用可能 → 下記の項目毎で、あてはまる主なものに○をつけてください（複数回答可）

製品に対する**対象者**や**被介護者の状況**について、  
 迷われている企業は協会にて支援致します。  
**本プロジェクト相談窓口よりご相談ください。**

### 介護保険制度 要介護認定

- 要支援 1、2    要介護 1    要介護 2    要介護 3    要介護 4～5

### 障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度） 参考：厚生労働省「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」

- 自立    ランク J（生活自立）    ランク A（準寝たきり）  
ランク B（寝たきり／座位保つ）    ランク C（寝たきり）

### 認知症高齢者の日常生活自立度 参考：厚生労働省「認知症高齢者の日常生活自立度」

- 自立    ランク I    ランク II（a・b）    ランク III（a・b）    ランク IV    ランク V

### 自社独自の分類

## 9 製品／サービスの使用上における制限（身体面・環境面含む）・禁忌及び注意事項

本製品を使用目的以外の方法に使用しないでください。

本製品でマットレスと被介助者を包み込み運ばないでください。

本製品は必ずマットレス下に装着し、単体では使用しないでください。

ご使用の際は、本製品をマットレスの下にセットし、ゴムバンドをマットレスの角に掛けてください。

## 10 製品／サービスの導入事例（写真やイメージ図含む）

緊急避難時にベッド上で臥位姿勢の被介助者の避難搬送に使用します。



患者さんに声がけします



マットレスごと患者さんを引き下ろします



階段を降りる際は前向きで降ります