

体験導入ワークショップ（機器貸出） ～介護テクノロジーマッチングに向けて～

介護テクノロジー紹介シート

企業名 : フランスベッド株式会社

企業 URL : <https://www.francebed.co.jp/> (ハイパーリンクを挿入してください)

※ A4 2面（裏表）一枚に、1機種の情報が入るよう、以下をご記入ください。

1 製品／サービスの活用場面 下記の項目で、あてはまる主なものに○をつけてください（複数回答可）

- 居室 トイレ 個室 個室脱衣所 特殊浴槽 特殊浴槽脱衣所
食堂 多目的ホール（共有リビングスペース） 看護・介護ステーション リハビリ室
会議室 事務室 送迎車 その他（ ）

2 製品／サービスの分類 下記の項目で、あてはまる主なものに1つに○をつけてください

- 見守り支援 移乗支援 移動支援 入浴支援 排泄支援 食事支援
リハビリ支援 介護記録等 介護業務支援 居室環境等管理支援 ヘルスケア
その他（ ）

3 製品／サービスの特徴

ベッドからの離床に対し、身体的・精神的な負担を感じる利用者・介助者

に対し、

寝姿勢から立ち上がり姿勢まで4つのポジションに変形し、負担を軽減しながら離床を支援

することができる

4 製品／サービスで期待できる効果 下記の項目で、あてはまる主なものに○をつけてください（複数回答可）

- 介護者の身体的負担軽減 介護者の精神的負担軽減 介護スタッフ間の連携強化
被介護者の安全確保 被介護者の QOL 向上 被介護者と介護スタッフとのコミュニケーション充実
人材育成・定着促進 周辺業務の効率化・省力化 業務全体のマネージメント向上

5 製品／サービス名・写真

製品名／サービス名：離床支援 マルチポジションベッド

製品／サービスの URL : <https://www.youtube.com/watch?v=jl5NHrERys&authuser=0>

製品／サービスの写真・動画 ※1機種の写真や動画 URL を載せてください

寝姿勢から立ち上がりまでサポートする

4つのポジション

マルポジ 1 ベッドポジション
ベッド本来の「眠る」姿勢をとり、ゆっくりお休みになれるポジション。

マルポジ 2 リクライニングポジション
背上げと脚上げでお好みの角度に調節し、リラックスした姿勢をとることができるポジション。

マルポジ 3 シーティングポジション
足裏を床につけ、確座位をとることが困難だった方も安定した座位姿勢がとれるポジション。

マルポジ 4 スタンディングポジション
リフトアップ機能で、立ち上がり・移乗をサポートするポジション。

6 製品／サービスの概要（想定価格も含む）

本製品に搭載されております「マルチポジションボタン」1つで4つのポジションを取ることができます。
 介助者はボタン操作で介助のしやすい姿勢にしたり、移乗介助をしやすい体勢にすることで移乗介助の労力を軽減することができます。
 想定価格：952,000円から

7 製品／サービスの主な対象者 下記の項目で、あてはまる主なものに○をつけてください（複数回答可）

- 介護者（施設ケア） 介護者（在宅ケア） 被介護者（施設ケア） 被介護者（在宅ケア）
 リハビリ利用者（集団） リハビリ利用者（個別） 管理者（スタッフ管理） 管理者（利用者管理）

8 想定している被介護者の状況

- 想定できていない・検討中 → ⑨ にすすむ
 被介護者の状態無関係に利用可能 → ⑨ にすすむ
 被介護者の状態次第にて利用可能 → 下記の項目毎で、あてはまる主なものに○をつけてください（複数回答可）

製品に対する**対象者**や**被介護者の状況**について、
 迷われている企業は協会にて支援致します。
本プロジェクト相談窓口よりご相談ください。

介護保険制度 要介護認定

- 要支援 1、2 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4～5

障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度） 参考：厚生労働省「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」

- 自立 ランク J（生活自立） ランク A（準寝たきり）
 ランク B（寝たきり／座位保つ） ランク C（寝たきり）

認知症高齢者の日常生活自立度 参考：厚生労働省「認知症高齢者の日常生活自立度」

- 自立 ランク I ランク II（a・b） ランク III（a・b） ランク IV ランク V

自社独自の分類

9 製品／サービスの使用上における制限（身体面・環境面含む）・禁忌及び注意事項

リフトの利用について
 ベッドの頭側からリフトを利用する場合のベースフレーム脚部の外寸は約 93 cm です。
 ベッド側面から利用する場合のベースフレーム脚部の内寸は約 158 cm、床面からの高さは約 5 cm です。
 脚側からはリフトを使用しないで下さい。

10 製品／サービスの導入事例（写真やイメージ図含む）

※実際、施設等で使用されている様子の写真を載せてください。
 ない場合は、⑤の掲載のみで、⑩は空欄としてください。⑤と⑩で重複した写真の掲載は不要です。