

体験導入ワークショップ（機器貸出） ～介護テクノロジーマッチングに向けて～

介護テクノロジー紹介シート

企業名 : シーマン株式会社

企業 URL : <https://www.sheen-man.co.jp/> (ハイパーリンクを挿入しておいてください)

※ A4 2面（裏表）一枚に、1機種の情報が入るよう、以下をご記入ください。

1 製品／サービスの活用場面 下記の項目で、あてはまる主なものに○をつけてください（複数回答可）

- 居室 トイレ 個室 個室脱衣所 特殊浴槽 特殊浴槽脱衣所
食堂 多目的ホール（共有リビングスペース） 看護・介護ステーション リハビリ室
会議室 事務室 送迎車 その他（ ）

2 製品／サービスの分類 下記の項目で、あてはまる主なものに1つに○をつけてください

- 見守り支援 移乗支援 移動支援 入浴支援 排泄支援 食事支援
リハビリ支援 介護記録等 介護業務支援 居室環境等管理支援 ヘルスケア
その他（ ）

3 製品／サービスの特徴

座位姿勢、立位姿勢が取れるが体幹保持が不安
定な人

に対し、

介助者はテイクオフベルトのストラップをつかんで支援す
ること、被介助者のスボンやおむつをつかむことなく支
援

することができる

4 製品／サービスで期待できる効果 下記の項目で、あてはまる主なものに○をつけてください（複数回答可）

- 介護者の身体的負担軽減 介護者の精神的負担軽減 介護スタッフ間の連携強化
被介護者の安全確保 被介護者の QOL 向上 被介護者と介護スタッフとのコミュニケーション充実
人材育成・定着促進 周辺業務の効率化・省力化 業務全体のマネージメント向上

5 製品／サービス名・写真

製品名／サービス名 : テイクオフベルト

製品／サービスの URL : <https://www.sheen-man.co.jp/product-cat05/takeoffbelt/>

製品／サービスの写真・動画 ※1機種の写真や動画 URL を載せてください



https://www.youtube.com/watch?v=TJvZvl_AvjM

6 製品／サービスの概要（想定価格も含む）

被介助者がテイクオフベルトを装着することで、歩行訓練時に被介助者のズボンやおむつをつかむことなく、テイクオフベルトをつかむ、しっかりと安定したサポートができます。重度被介助者の座位移乗や排泄時の支援に使用できます。

想定価格：定価 ¥ 22,000（税抜き）

7 製品／サービスの主な対象者 下記の項目で、あてはまる主なものに○をつけてください（複数回答可）

- 介護者（施設ケア） ○介護者（在宅ケア） ○被介護者（施設ケア） ○被介護者（在宅ケア）
○リハビリ利用者（集団） ○リハビリ利用者（個別） □管理者（スタッフ管理） □管理者（利用者管理）

8 想定している被介護者の状況

- 想定できていない・検討中 → ⑨ にすすむ
□被介護者の状態無関係に利用可能 → ⑨ にすすむ
□被介護者の状態次第にて利用可能 → 下記の項目毎で、あてはまる主なものに○をつけてください（複数回答可）

製品に対する**対象者**や**被介護者の状況**について、
迷われている企業は協会にて支援致します。
本プロジェクト相談窓口よりご相談ください。

介護保険制度 要介護認定

- 要支援 1、2 ○要介護 1 ○要介護 2 ○要介護 3 □要介護 4～5

障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度） 参考：厚生労働省「障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度）」

- 自立 □ランクJ（生活自立） ○ランクA（準寝たきり）

- ランクB（寝たきり／座位保つ） □ランクC（寝たきり）

認知症高齢者の日常生活自立度 参考：厚生労働省「認知症高齢者の日常生活自立度」

- 自立 □ランクI □ランクII（a・b） □ランクIII（a・b） □ランクIV □ランクV

自社独自の分類

9 製品／サービスの使用上における制限（身体面・環境面含む）・禁忌及び注意事項

使用時は被介助者から目を離さないでください。

本製品に表示されている被介助者の体重を超えないでください。

被介助者の腰囲に合ったサイズの本製品を使用してください。

洗濯時の柔軟剤の使用は避けてください。

10 製品／サービスの導入事例（写真やイメージ図含む）

歩行訓練や重度被介助者の座位移乗、簡易スタンディングリフトのテイクオフとの併用時に使用します。



歩行訓練



重度被介助者の
座位移乗



簡易スタンディングリフト
のテイクオフとの併用