

体験導入ワークショップ（機器貸出） ～介護テクノロジーマッチングに向けて～

介護テクノロジー紹介シート

企業名 : シーマン株式会社

企業 URL : <https://www.sheen-man.co.jp/> (ハイパーリンクを挿入しておいてください)

※ A4 2面（裏表）一枚に、1機種の情報が入るよう、以下をご記入ください。

1 製品／サービスの活用場面 下記の項目で、あてはまる主なものに○をつけてください（複数回答可）

- 居室 トイレ 個室 個室脱衣所 特殊浴槽 特殊浴槽脱衣所
食堂 多目的ホール（共有リビングスペース） 看護・介護ステーション リハビリ室
会議室 事務室 送迎車 その他（ ）

2 製品／サービスの分類 下記の項目で、あてはまる主なものに1つに○をつけてください

- 見守り支援 移乗支援 移動支援 入浴支援 排泄支援 食事支援
リハビリ支援 介護記録等 介護業務支援 居室環境等管理支援 ヘルスケア
その他（ ）

3 製品／サービスの特徴

座位姿勢も立位姿勢も保持できるが、補助がないと立ち上がりが難しい人や足の踏み替えが難しい人

に対し、

対面で立ち上がり動作の支援や、立位姿勢で方向転換がしやすいため、トイレでの排泄介助を介助者一人でも

することができる

4 製品／サービスで期待できる効果 下記の項目で、あてはまる主なものに○をつけてください（複数回答可）

- 介護者の身体的負担軽減 介護者の精神的負担軽減 介護スタッフ間の連携強化
被介護者の安全確保 被介護者の QOL 向上 被介護者と介護スタッフとのコミュニケーション充実
人材育成・定着促進 周辺業務の効率化・省力化 業務全体のマネジメント向上

5 製品／サービス名・写真

製品名／サービス名 : テイクオフ（簡易スタンディングリフト）

製品／サービスの URL : <https://www.sheen-man.co.jp/product/product-cat05/takeoff/>

製品／サービスの写真・動画 ※1機種の写真や動画 URL を載せてください



【本製品の使用対象者】

- ・補助があれば立ち上がりや立位姿勢が取れて、バランスも取れる人。
- ・スタンディングハンドルをつかめて、介助者の指示が理解できる人

<https://youtu.be/kUW2eIJINAs>

6 製品／サービスの概要（想定価格も含む）

座位姿勢と立位姿勢は保持できるが、起居動作に支援が必要な被介護者が対象です。立位が取れる被介護者の立位姿勢の支援は、足底に体重がかかる状態を支援します。

被介護者の方向転換ができるため、例えば、トイレでの排泄介助を一人介助で行えます。日本の使用環境に合わせたコンパクト設計です。

7 製品／サービスの主な対象者 下記の項目で、あてはまる主なものに○をつけてください（複数回答可）

- 介護者（施設ケア） 介護者（在宅ケア） 被介護者（施設ケア） 被介護者（在宅ケア）
 リハビリ用者（集団） リハビリ利用者（個別） 管理者（スタッフ管理） 管理者（利用者管理）

8 想定している被介護者の状況

- 想定できていない・検討中 → ⑨ にすすむ
 被介護者の状態無関係に利用可能 → ⑨ にすすむ
 被介護者の状態次第にて利用可能 → 下記の項目毎で、あてはまる主なものに○をつけてください（複数回答可）

製品に対する**対象者**や**被介護者の状況**について、
迷われている企業は協会にて支援致します。
本プロジェクト相談窓口よりご相談ください。

介護保険制度 要介護認定

- 要支援 1、2 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4～5

障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度） 参考：厚生労働省「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」

- 自立 ランク J（生活自立） ランク A（準寝たきり）
 ランク B（寝たきり／座位保つ） ランク C（寝たきり）

認知症高齢者の日常生活自立度 参考：厚生労働省「認知症高齢者の日常生活自立度」

- 自立 ランク I ランク II（a・b） ランク III（a・b） ランク IV ランク V

自社独自の分類

9 製品／サービスの使用上における制限（身体面・環境面含む）・禁忌及び注意事項

テイクオフは室内の、平らな場所の短距離移動用です。

対象者は次の項目ができる方になります。1. 立位姿勢と座位姿勢が取れる。2. 補助があれば立ち上がり、バランスを取ることができる。

3. スタンディングハンドルをつかむことができる。4. 介助者の指示を理解できる。

10 製品／サービスの導入事例（写真やイメージ図含む）

起居動作の支援や室内の短距離移動、方向転換、トイレ介助に使用します。

