

体験導入ワークショップ（機器貸出） ～介護テクノロジーマッチングに向けて～

介護テクノロジー紹介シート

企業名 : シーマン株式会社

企業 URL : <https://www.sheen-man.co.jp/> (ハイパーリンクを挿入しておいてください)

※ A4 2面（裏表）一枚に、1機種の情報が入るよう、以下をご記入ください。

1 製品／サービスの活用場面 下記の項目で、あてはまる主なものに○をつけてください（複数回答可）

- 居室 トイレ 個室 個室脱衣所 特殊浴槽 特殊浴槽脱衣所
食堂 多目的ホール（共有リビングスペース） 看護・介護ステーション リハビリ室
会議室 事務室 送迎車 その他（ ）

2 製品／サービスの分類 下記の項目で、あてはまる主なものに1つに○をつけてください

- 見守り支援 移乗支援 移動支援 入浴支援 排泄支援 食事支援
リハビリ支援 介護記録等 介護業務支援 居室環境等管理支援 ヘルスケア
その他（座位姿勢の補正支援）

3 製品／サービスの特徴

座位の不良姿勢	両足の大腿部の下にフローボードオーバル XS サイズを差し込み、被介護者の膝を座奥方向へ押すことで座位姿勢を補正しやすく	に対して、	することができる
---------	--	-------	----------

4 製品／サービスで期待できる効果 下記の項目で、あてはまる主なものに○をつけてください（複数回答可）

- 介護者の身体的負担軽減 介護者の精神的負担軽減 介護スタッフ間の連携強化
被介護者の安全確保 被介護者の QOL 向上 被介護者と介護スタッフとのコミュニケーション充実
人材育成・定着促進 周辺業務の効率化・省力化 業務全体のマネジメント向上

5 製品／サービス名・写真

製品名／サービス名 : フローボードオーバル XS サイズ（裏面に滑り止めテープは付いていません）

製品／サービスの URL : https://www.sheen-man.co.jp/product/product-cat05/flowboard_oval/

製品／サービスの写真・動画 ※1 機種の写真や動画 URL を載せてください



【座位の不良姿勢の補正の方法】

1. 両足の大腿部の下に 1 枚ずつ差し込む
2. 被介護者の両膝を同時に座奥方向に押す
3. 大腿部下の本製品を外側より引き抜く

https://youtu.be/71jXP_ZMBaM

6 製品／サービスの概要（想定価格も含む）

座位姿勢の座り直しを補助します。

座位姿勢時の介護用リフトのスリングシート脚部を装着する補助に使用します。

想定価格：定価 ¥ 34,000（2枚セット、税抜き）

7 製品／サービスの主な対象者 下記の項目で、あてはまる主なものに○をつけてください（複数回答可）

- 介護者（施設ケア） 介護者（在宅ケア） 被介護者（施設ケア） 被介護者（在宅ケア）
 リハビリ利用者（集団） リハビリ利用者（個別） 管理者（スタッフ管理） 管理者（利用者管理）

8 想定している被介護者の状況

- 想定できていない・検討中 → ⑨ にすすむ
 被介護者の状態無関係に利用可能 → ⑨ にすすむ
 被介護者の状態次第にて利用可能 → 下記の項目毎で、あてはまる主なものに○をつけてください（複数回答可）

製品に対する**対象者**や**被介護者の状況**について、
迷われている企業は協会にて支援致します。
本プロジェクト相談窓口よりご相談ください。

介護保険制度 要介護認定

- 要支援 1、2 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4～5

障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度） 参考：厚生労働省「障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度）」

- 自立 ランク J（生活自立） ランク A（準寝たきり）
 ランク B（寝たきり／座位保つ） ランク C（寝たきり）

認知症高齢者の日常生活自立度 参考：厚生労働省「認知症高齢者の日常生活自立度」

- 自立 ランク I ランク II（a・b） ランク III（a・b） ランク IV ランク V

自社独自の分類

9 製品／サービスの使用上における制限（身体面・環境面含む）・禁忌及び注意事項

ポジショニング時には被介護者から目を離さないでください。

本製品は座位移乗には使用できません。

10 製品／サービスの導入事例（写真やイメージ図含む）

座位姿勢時の、座奥への座り直しや介護用リフトのスリングシート脚部の装着に使用いたします。

