

体験導入ワークショップ（機器貸出） ～介護テクノロジーマッチングに向けて～

介護テクノロジー紹介シート

企業名 : 株式会社タイカ/株式会社 a b a (アバ)

企業 URL : <https://www.aba-lab.com/> (ハイパーリンクを挿入しておいてください)

※ A4 2面（裏表）一枚に、1機種の情報が入るよう、以下をご記入ください。

1 製品/サービスの活用場面 下記の項目で、あてはまる主なものに○をつけてください（複数回答可）

- 居室 トイレ 個室 個室脱衣所 特殊浴槽 特殊浴槽脱衣所
食堂 多目的ホール（共有リビングスペース） 看護・介護ステーション リハビリ室
会議室 事務室 送迎車 その他（ ）

2 製品/サービスの分類 下記の項目で、あてはまる主なものに1つに○をつけてください

- 見守り支援 移乗支援 移動支援 入浴支援 排泄支援 食事支援
リハビリ支援 介護記録等 介護業務支援 居室環境等管理支援 ヘルスケア
その他（ ）

3 製品/サービスの特徴

ご施設スタッフの皆様	アプリを使用することでお手持ちの PC やスマートフォンに排泄記録の保存し、排泄リズムを把握
------------	--

に対し、 することができる

4 製品/サービスで期待できる効果 下記の項目で、あてはまる主なものに○をつけてください（複数回答可）

- 介護者の身体的負担軽減 介護者の精神的負担軽減 介護スタッフ間の連携強化
被介護者の安全確保 被介護者の QOL 向上 被介護者と介護スタッフとのコミュニケーション充実
人材育成・定着促進 周辺業務の効率化・省力化 業務全体のマネージメント向上

5 製品/サービス名・写真

製品名/サービス名 : Helppad 2 (ヘルパッド)

製品/サービスの URL : <https://helppad.jp/helppad2> (ハイパーリンクを挿入しておいてください)

製品/サービスの写真・動画 ※1 機種の写真や動画 URL を載せてください

Helppad
新しいから生まれた排泄センサー「ヘルパッド」

において検知
尿と便がわかる
AI が分析・学習

おむつを開けず中が見たい

ヘルパッド2は
介護職の方の願いから生まれた
排泄センサーです。

ヘルパッド2の特徴

『におい』で
便と尿を検知
してお知らせ

AIによる排せ物の検知の精度向上

センサーが排泄の「におい」に
反応して便と尿をそれぞれ検知。
入居者様の排泄をヘルパッド2
がお知らせしますので、必要な
タイミングでのおむつ交換が可能
となり、排泄ケア業務の負担軽
減につながります。

6 製品／サービスの概要（想定価格も含む）

製品名 Helppad 2 品番 HP001A

使用の目的

ベッド上の使用者がおむつ内に排泄したことを検知し、排泄情報の記録や排泄リズムを把握することを目的とする

想定価格：オープン価格

7 製品／サービスの主な対象者 下記の項目で、あてはまる主なものに○をつけてください（複数回答可）

- 介護者（施設ケア） 介護者（在宅ケア） 被介護者（施設ケア） 被介護者（在宅ケア）
 リハビリ利用者（集団） リハビリ利用者（個別） 管理者（スタッフ管理） 管理者（利用者管理）

8 想定している被介護者の状況

想定できていない・検討中 → ⑨ にすすむ

被介護者の状態無関係に利用可能 → ⑨ にすすむ

被介護者の状態次第にて利用可能 → 下記の項目毎で、あてはまる主なものに○をつけてください（複数回答可）

介護保険制度 要介護認定

- 要支援 1、2 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4～5

障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度） 参考：厚生労働省「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」

- 自立 ランク J（生活自立） ランク A（準寝たきり）

- ランク B（寝たきり／座位保つ） ランク C（寝たきり）

認知症高齢者の日常生活自立度 参考：厚生労働省「認知症高齢者の日常生活自立度」

- 自立 ランク I ランク II（a・b） ランク III（a・b） ランク IV ランク V

自社独自の分類

- ・日常的におむつを使用されている方で、おむつ内に排泄される方
- ・自力で体位交換が行えない方

9 製品／サービスの使用上における制限（身体面・環境面含む）・禁忌及び注意事項

- ・お香や食事のにおいなどで誤検知する可能性があります。
- ・お薬やサプリメント、食事の種類によっては排泄物の臭気が減少し、検知漏れを引き起こす可能性があります。

10 製品／サービスの導入事例（写真やイメージ図含む）

※実際、施設等で使用されている様子の写真を載せてください。

ない場合は、⑤の掲載のみで、⑩は空欄としてください。⑤と⑩で重複した写真の掲載は不要です。