

体験導入ワークショップ（機器貸出） ～介護テクノロジーマッチングに向けて～

介護テクノロジー紹介シート

企業名 : アビリティーズ・ケアネット株式会社

企業 URL : <https://www.abilities.jp> (ハイパーリンクを挿入しておいてください)

※ A4 2面（裏表）一枚に、1機種の情報が入るよう、以下をご記入ください。

1 製品／サービスの活用場面 下記の項目で、あてはまる主なものに○をつけてください（複数回答可）

- 居室 トイレ 個室 個室脱衣所 特殊浴槽 特殊浴槽脱衣所
食堂 多目的ホール（共有リビングスペース） 看護・介護ステーション リハビリ室
会議室 事務室 送迎車 その他（ ）

2 製品／サービスの分類 下記の項目で、あてはまる主なものに1つに○をつけてください

- 見守り支援 移乗支援 移動支援 入浴支援 排泄支援 食事支援
リハビリ支援 介護記録等 介護業務支援 居室環境等管理支援 ヘルスケア
その他（ ）

3 製品／サービスの特徴

自分の力でペダルを漕げない方や漕げる方、
移乗が困難な方、転倒リスクのある方等

に対し、

車いすに座った状態で、内蔵モーターのアシスト
により他動運動、自動介助運動、抵抗運動の
3つの運動を1台で

することができる

4 製品／サービスで期待できる効果 下記の項目で、あてはまる主なものに○をつけてください（複数回答可）

- 介護者の身体的負担軽減 介護者の精神的負担軽減 介護スタッフ間の連携強化
被介護者の安全確保 被介護者の QOL 向上 被介護者と介護スタッフとのコミュニケーション充実
人材育成・定着促進 周辺業務の効率化・省力化 業務全体のマネージメント向上

5 製品／サービス名・写真

製品名／サービス名 : 電動アシスト付き自転車エルゴメーター セラトレナーティーゴ

製品／サービスの URL : https://www.abilities.jp/fukushi_kaigo_kiki/fukusiyougu/kinou_kunren/138974

製品／サービスの写真・動画 ※1機種の写真や動画 URL を載せてください



6 製品／サービスの概要（想定価格も含む）

内蔵モーターのペダル回転による他動運動～抵抗運動まで行えるオールラウンダー

3つの運動（他動運動、自動介助運動、抵抗運動）に対応しているので、自分でペダルこぎができない方も、いすや車いすに座った状態で運動することができます。痙性を感知すると、回転が自動停止する安心機能付。

想定価格：1,441,000円（上肢トレーニング付モデル／1,649,000円）

7 製品／サービスの主な対象者 下記の項目で、あてはまる主なものに○をつけてください（複数回答可）

- 介護者（施設ケア） 介護者（在宅ケア） 被介護者（施設ケア） 被介護者（在宅ケア）
 リハビリ利用者（集団） リハビリ利用者（個別） 管理者（スタッフ管理） 管理者（利用者管理）

8 想定している被介護者の状況

想定できていない・検討中 → ⑨ にすすむ

被介護者の状態無関係に利用可能 → ⑨ にすすむ

被介護者の状態次第にて利用可能 → 下記の項目毎で、あてはまる主なものに○をつけてください（複数回答可）

介護保険制度 要介護認定

- 要支援 1、2 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4～5

障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度） 参考：厚生労働省「障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度）」

- 自立 ランク J（生活自立） ランク A（準寝たきり）

- ランク B（寝たきり／座位保つ） ランク C（寝たきり）

認知症高齢者の日常生活自立度 参考：厚生労働省「認知症高齢者の日常生活自立度」

- 自立 ランク I ランク II（a・b） ランク III（a・b） ランク IV ランク V

自社独自の分類

セラトレーナーをご利用にあたっては、事前にかかりつけの医師等にご相談ください。

9 製品／サービスの使用上における制限（身体面・環境面含む）・禁忌及び注意事項

▼次の方は必ず使用の前に医師または理学療法士と相談してください。循環器疾患をお持ちの方、ペースメーカー等の電磁障害の影響を受ける体内埋込型医療電気機器を使用している方、関節に重い障がいがある方、足の筋肉をコントロールできない方、股関節や膝関節の伸展に制限のある方、骨粗しょう症の方、骨形成不全の方、上記以外に身体に特に異常を感じている方等 ▼利用者制限 体重：120kg 以下 身長：120 ～ 200cm

10 製品／サービスの導入事例（写真やイメージ含む）

※実際、施設等で使用されている様子の写真を載せてください。

ない場合は、⑤の掲載のみで、⑩は空欄としてください。⑤と⑩で重複した写真の掲載は不要です。